

Gebrauchsanweisung Rigi-Box® euroMatic

Gültig ab 01.01.2005 * 06 / Gebrauchsanweisung euromatic_d.cdr

Typen: 3000, 4000, 6000, 7000

Spitze und scharfe Gegenstände oder kontaminierte Gebrauchsartikel können bei unsachgemäßer Handhabung Gefahr für Leib und Leben darstellen. Bitte beachten Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise.

1. Montage (Deckelmontage)

Vor dem Befüllen die Box auf einen festen Untergrund stellen und den Deckel (1) fest auf das Boxenunterteil (2) drücken, der Deckel (1) rastet ringsum hörbar ein.

2. Täglicher Gebrauch

Die Box öffnet sich automatisch per Knopfdruck (Abb.1). Für den täglichen Gebrauch den Tagesdeckel (3) leicht Richtung Füllöffnung (4) eindrücken, dann ist ein Öffnen wieder möglich. (Abb. 2)

3. Endverschluss des Tagesdeckels (3)

Nach Befüllung der Box wie folgt verfahren:
Die Box auf einen festen Untergrund stellen und den Tagesdeckel (3) fest in die Füllöffnung (4) drücken, bis der Tagesdeckel ringsum hörbar einrastet. (Abb.3) Der Tragegriff wird automatisch frei und springt nach oben (Abb.4).

4. Füll-Linie (5)

Im oberen Teil der Boxen ist eine Füll-Linie (5) sichtbar. Die Box darf aus Sicherheitsgründen nicht über diese Füll-Linie (5) hinaus befüllt werden.

5. Halte-Elemente

5.1 Befestigen (7)

Empfehlung: Verwendung von Halte-Elementen zum sicheren Umgang mit Entsorgungsboxen:

- Klebeadapter=Befestigung auf d. Untergrund
- Wandhalter 1=Befestigung mit Adapter
- Wandhalter 2=Befestigung mit Schiene
- Wandhalter 3=Befestigung mit Ring

laut gesonderter Liste mit gesonderter Gebrauchsanweisung.

5.3 Tragevorrichtung (9, 10)

Im oberen Teil der Box ist eine Tragevorrichtung (9) angebracht. Bei noch nicht endgültigem Endverschluss kann die Box an dieser Haltevorrichtung getragen werden.

Wenn die Entsorgungsbox endgültig verschlossen wird (Abb.3), springt automatisch ein Tragegriff (10) nach oben (Abb.4). Dieser Tragegriff signalisiert, dass die Box endgültig verschlossen wurde. An diesem Tragegriff (10) kann die "normal befüllte" Box bequem zur Entsorgungsstätte getragen werden. (maximale Belastung des Tragegriffs ca. 6 kg)

6. Abdreh-/Abziehvorrückung

6.1 Aussparung mit Stufen (A)






Kanülenansatz bei Blutentnahmesystemen in gezackte Aussparung (A) einlegen, bis die Flanken des Blutentnahmesystems greifen. Kanüle gegen Uhrzeigerichtung drehen, bis Kanüle abgedreht ist. Kanüle fällt dann in das Boxenunterteil (2).

6.2 Halbrunde Aussparung (B)

Diese Kerbe (B) dient dem Abziehen von normalen Kanülen vom Spritzenkörper. Sollte das verwendete Blutentnahmesystem in diese Aussparung (B) passen, Kanüle gegen Uhrzeigerichtung drehen, bis Kanüle abgedreht ist und in das Boxenunterteil fällt.

6.4 Skalpell-Abzugsvorrichtung (D)

Die Abzugsvorrichtung für Skalpelle trennt die Klinge vom Aufnahmeschaft, indem die Klinge beim einschieben leicht angehoben und verrastet wird. Beim wieder abheben, fällt die Klinge in die Box.

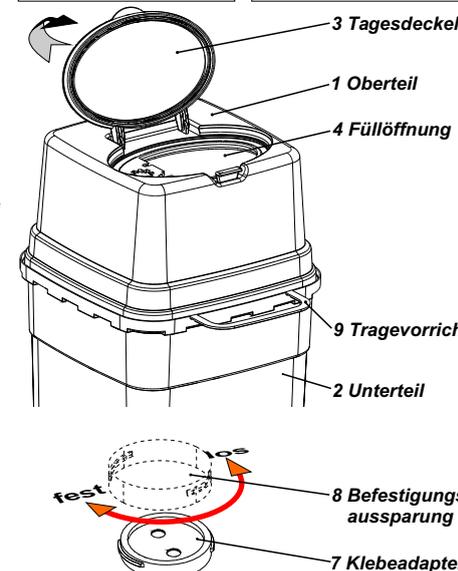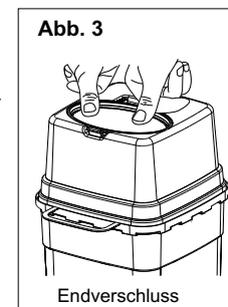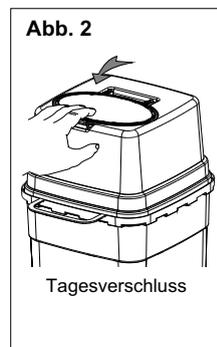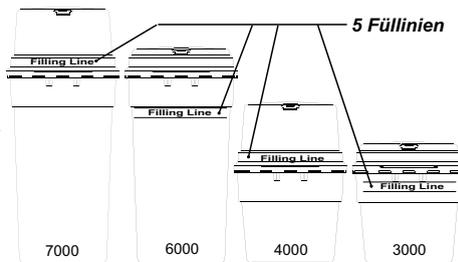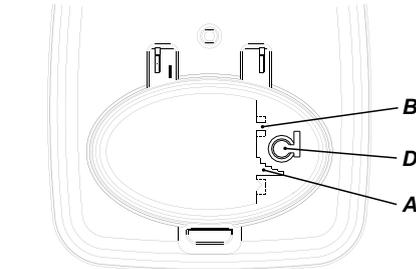

A. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Entsorgungsbehälter dienen ausschließlich zur Entsorgung von Kanülen, Spritzen, Skalpell und Glasbruch aus dem medizinischen Bereich. Alle anderen Verwendungsarten sind nicht bestimmungsgemäß. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entfällt die Herstellerhaftung.

B. Allgemeine Beschreibung

Die benannten Entsorgungsboxen bestehen aus umweltfreundlichem Polypropylen. Bei der Verbrennung entstehen - keine schädlichen Emissionen.

Die Herstellerdaten, wie Herstellerdatum (Monat/Jahr) und die Identifizierungsnummer, sind für eine Chargenrückverfolgung auf dem Behälter angegeben.

C. Entsorgung und Kennzeichnung:

Die zu entsorgenden Produkte (siehe bestimmungsgemäße Verwendung) müssen vor dem Befüllen des Entsorgungsbehälters auf spezifizierte oder unspezifizierte Schadstoffe geprüft und die Box durch einen Verantwortlichen nach Gefährdungsgrad gekennzeichnet werden.

Beachten Sie zur Entsorgung der Box die gesetzlichen Richtlinien, bzw. Vorschriften der einzelnen Bundesländer.

7. Sicherheitshinweise

- Box zum Zusammenbau und Endverschluss auf einen festen Untergrund stellen.
- Der Deckel (1) muss vor Beginn der Befüllung aufgesetzt und eingerastet sein.
- Box nicht über die Füll-Linie (5) befüllen. (Verletzungsgefahr!)
- Nicht mit der Hand oder in sonstiger Weise in die Box fassen. (Verletzungsgefahr!)
- Keine Gegenstände gewaltsam in die Box drücken.
- Befüllte Box nicht von außen in irgendeiner Weise zusammendrücken.
- Vor der Entsorgung der Box genau prüfen, dass Deckel 1 und 3 fest verschlossen sind.
- Skalpelle müssen mit besonderer Sorgfalt in die Box entsorgt werden. Durch zu hohe Krafteinwirkung beim Einwerfen oder beim Nachfüllen anderer Gegenstände besteht die Gefahr einer Verkantung und Beschädigung der Boxenwandungen oder des Boxenbodens.
- Keine Flüssigkeiten in die Box einfüllen.
- Box mit empfohlenem Wandhalter oder Klebeadapter durch Aufdrehen verbinden, um ein Umfallen zu verhindern.
- Gebrauchsanweisung und Box-Aufschriften beachten.
- Box nicht herunterwerfen. Box nicht schütteln. Box nicht fallenlassen.
- Vor Verschluss der Box prüfen, ob Gegenstände aus der Öffnung ragen, sonst entfernen.
- Box nur mit den Händen und nicht gewaltsam schließen.
- Den Klappdeckel (3) nicht zum Eindrücken der zu entsorgenden Gegenstände verwenden.
- Gefährgut niemals schräg, sondern nur senkrecht in die Box abwerfen.
- Box beim Endverschluss (Pos 3.) nicht gegen den eigenen Körper (z.B. Brust) drücken.
- Nur Boxen in der Größe verwenden, die für die Aufnahme der zu entsorgenden Gegenstände geeignet sind.
- Bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung und der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen.

● Spitze und scharfe Gegenstände gehören nicht in Plastiksäcke oder andere ungeeignete Behältnisse.

Hinweis:

Abweichungen der Angaben und Darstellungen in dieser Gebrauchsanweisung, die durch technische Änderungen, die zur Verbesserung des Produktes notwendig werden, sind vorbehalten.